

외과용품 사용설명서

- 제조업허가번호 : 제5151호
- 제조인증번호 : 제신24-593호
- 제품명 : BNG Silicone Pad, BNG Silicone Roll, BNG Silicone Guard, 비앤지 실리콘 가드
- 품목명 : 외과용품
- 모델명 : BG-SP175외 22건
- 사용목적 : 수술부위에 덮어 오염 등에서부터 보호하는데 사용하는 천연재료 또는 인조재료로 만든 기구로서 상처 부위 또는 인체 내부와 직접적인 접촉이 없는 일회용 제품이다.
- 부작용 보고 관련 문의처 : 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

■ 사용방법

가. 사용 전 준비 사항

- 1) 제품 포장의 훼손 여부와 제품의 사용기간을 확인 한다.
- 2) 부착 부위에 물, 땀 등의 수분이나 기름 등의 유분을 충분히 제거한다.

나. 사용방법

- 1) 제품을 놓을 위치에 이물질 등을 제거하는 등 청결을 유지한다.
- 2) 적합한 크기의 제품을 사용하거나, 잘라서 사용한다.
- 3) 필요시 2~3겹으로 적층시켜 사용할 수 있다.

다. 사용 후의 보관 및 관리 방법

- 1) 일회용 의료기기이므로 재사용을 금지한다.
- 2) 사용 후에는 재사용을 금지하고 반드시 폐기한다.

■ 사용 시 주의사항

- 1) 사용 전 제품의 상태를 육안으로 확인한다.
- 2) 사용 중 변형 또는 포장이 훼손된 제품은 기능의 손상이 있을 수 있으므로 사용을 중단한다.
- 3) 직사광선을 피하고 실온에 보관한다.
- 4) 사용기간이 지난 제품은 사용하지 않는다.
- 5) 정상 피부에 사용해야 하며 창상을 보호하는 목적으로 사용하지 않는다.
- 6) 알레르기성 피부 또는 과민반응이 나타날 경우, 장시간 사용 시 가려움 등이 발생하는 경우는 즉시 사용을 중단한다.
- 7) 본 제품은 일회용 의료기기이다.

■ 제조원

(주)밴드골드

경기도 안양시 만안구 일직로94번길 42, 1층, 3층, 5층(석수동)

개정 년.월.일. : 2026.03.25.

의료기기/일회용