

피부보호대 사용설명서

- 제조업허가번호 : 제5151호
- 제조신고번호 : 제신24-1060호
- 제품명 : BNG Poam Silicone Border
- 품목명 : 피부보호대
- 모델명 : BG-SB222외 27건
- 사용목적 : 의료용 시술이나 치료 등에 사용하기 위하여 환자의 피부에 가해지는 압박을 줄이는 목적 등으로 의료기관에서 사용하거나 체액 흡수 등으로 환자의 피부를 보호하기 위한 목적으로 사용하는 기구. 다만, 욕창 등을 방지하고자 사용하는 매트리스, 방석 등의 기구는 여기에서 제외한다.

■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 제품 포장의 훼손 여부와 제품의 사용기간을 확인 한다.
- 2) 부착 부위에 물, 땀 등의 수분이나 기름 등의 유분을 충분히 제거한다.

나. 사용방법

- 1) 제품을 놓을 위치에 이물질 등을 제거하는 등 청결을 유지한다.
- 2) 적합한 크기의 제품에 이형지를 제거 후 적용 부위에 붙여준다.
- 3) 제품을 떼 때 살짝 적셔주면 쉽게 제거할 수 있다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 일회용 멸균 의료기기이므로 재사용을 금지하며 사용 후 바로 폐기한다.

■ 사용 시 주의사항

- 1) 사용 전 제품의 상태를 육안으로 확인한다.
- 2) 사용 중 변형 또는 포장에 훼손된 제품은 기능의 손상이 있을 수 있으므로 사용을 중단한다.
- 3) 직사광선을 피하고 실온에 보관한다.
- 4) 사용기간이 지난 제품은 사용하지 않는다.
- 5) 제품을 절단하지 않고 그대로 유지하여 사용한다.
- 6) 본 제품을 사용 목적 이외의 다른 목적으로는 사용하지 않는다.
- 7) 본 제품은 일회용 멸균 의료기기이므로 사용 후 바로 폐기한다.
- 8) 본 제품은 의료기기 등의 고정 목적으로의 사용을 금한다.
- 9) 본 제품은 상처부위에 사용을 금한다.
- 10) 알레르기성 피부 또는 과민반응이 나타날 경우, 장시간 사용 시 가려움 등이 발생하는 경우는 사용을 즉시 중단하고 의사와 상담한다.

■ 제조원

(주)밴드골드

경기도 안양시 만안구 일직로94번길 42, 1층, 3층, 5층(석수동)

■ 부작용 보고 관련 문의처

한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

개정 년.월.일. : 2026.03.25.