

압박용 밴드 사용설명서

- 제조업허가번호 : 제5151호
- 제조인증번호 : 제신24-577호
- 제품명 : BNG KOBAL PLUS, BNG C-Arm S
- 품목명 : 압박용 밴드
- 모델명 : BNG-K1 외 9건
- 포장단위 : 제조원 포장단위
- 저장방법 : 고온다습하고, 직사광선이 있는 장소를 피해 실온(1~30℃)에서 보관한다.
- 사용기간 : 제조일로부터 36개월
- 사용목적 : 혈액이 고는 것을 방지하거나 신체의 일부분을 탄력으로 압박 또는 잡아주는 기구. 보온 또는 흘러내림 방지와 찰과상 예방 및 충격완화 등의 목적으로 사용하는 스포츠 용품 또는 환부의 보존, 보호, 처치 등의 목적으로 사용하는 붕대 등은 제외한다.
- 부작용 보고 관련 문의처 : 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

■ 사용방법

1. 압박용 밴드

1) 사용 전 준비사항

- (1) 완제품의 포장 상태를 확인한다.
- (2) 사용목적 및 사용방법, 주의사항에 대하여 충분히 숙지 후 사용한다.

2) 사용방법

- (1) 원하는 신체부위에 알맞은 규격의 제품을 선택한다.
- (2) 압박부(해당모델) 부분을 이용하여 적용하고자 하는 부위 전체를 적당한 압력으로 감는다.
- (3) 고정부 부분을 감으면서 자착성을 이용하여 압박하면서 고정한다.
- (4) 원하는 길이만큼 감아 고정시키고, 남은 부분은 잘라낸다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용을 금지한다.

2. 구성품

1) 사용 전 준비사항

- (1) 사용하기 전 제품의 외관 및 포장에 이상이 없는지 확인한다.
- (2) 사용설명서를 숙지한 후 사용한다.

2) 사용방법

- (1) 포장을 개봉한 후 제품의 상단, 오른쪽, 왼쪽 접착테이프 이형지를 제거한 후 제품을 테이블에 부착한다.
- (2) 오염을 방지하기 위해 제품 내부에서 한 번 더 접착 부위를 눌러 고정한다.
- (3) 진료 시 제품에 부착된 벨크로를 테이블 반대 방향으로 힘을 가하여 벨크로를 분리한다.
- (4) 제품을 펼쳐 이동형 진료장비를 제품 안으로 회전할 수 있게 잡아준다.
- (5) 사용이 끝나면, 보호커버를 잡고 테이블 높이 위에서 유지한다.

(6) 진료장비를 다시 원위치로 회전시키고 제품을 테이블 방향으로 접은 후 벨크로에 다시 부착한다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

(1) 사용 후 폐기한다.

■ 사용 시 주의사항

1. 압박용 밴드

- 1) 제품의 변형은 제품의 기능에 변화를 가져올 수 있다.
- 2) 사용 중 변형된 제품은 사용하지 않는다.
- 3) 사용 시 강한 압박은 환자에게 손상을 줄 수 있다.
- 4) 본 제품은 환부의 보존, 보호, 처치의 목적으로 사용하지 않는다.
- 5) 본 제품은 정상피부에만 사용해야 한다.
- 6) 체질에 따라 사용 후 피부트러블이 발생할 수 있으므로 증상이 나타나는 경우 사용을 중지하고 의사의 처방을 따른다.
- 7) 같은 부위에 장시간 사용하지 않는다.
- 8) 다른 의료기기를 고정하는 목적 등의 신고된 사항과 다른 사용목적으로 사용하지 않는다.

2. 구성품

- 1) 본 제품 전문 교육을 받은 자만이 사용할 수 있다.
- 2) 본 제품을 사용할 때는 상처 부위 또는 인체 내부와 직접적인 접촉이 없어야 한다.
- 3) 제품 사용 중 이상이 있는 경우, 사용을 중지하고 전문가와 상담해야 한다.
- 4) 본 제품은 다른 용도로 사용해서는 안 된다.

■ 제조원

(주)밴드골드

경기도 안양시 만안구 일직로94번길 42, 1층, 3층, 5층(석수동)

개정 년.월.일. : 2026.03.25.

의료기기/일회용