

압박용 밴드 사용설명서

- 제조업허가번호 : 제5151호
- 제조인증번호 : 제신16-1491호
- 제품명 : 코바(KOBA), 코바 플러스(KOBA PLUS), 코만도 튜튼 코바(코만도 튜튼 KOBA),
그린 코바(GREEN KOBA), BNG 아이싱 KOBA
- 품목명 : 압박용 밴드
- 모델명 : BG-1 외 10건
- 포장단위 : 제조원 포장단위
- 저장방법 : 고온다습하고, 직사광선이 있는 장소를 피해 실온(1~30℃)에서 보관한다.
- 사용기간 : 제조일로부터 36개월
- 사용목적 : 혈액이 고는 것을 방지하거나 신체의 일부분을 탄력으로 압박 또는 잡아주는
기구. 보온 또는 흘러내림 방지와 찰과상 예방 및 충격완화 등의 목적으로 사
용하는 스포츠 용품 또는 환부의 보존, 보호, 처치 등의 목적으로 사용하는 붕
대 등은 제외한다.
- 부작용 보고 관련 문의처 : 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

■ 사용방법

1. 사용 전 준비사항

- 1) 체질에 따라 피부트러블이 발생할 수 있으므로 의사처방에 따라 사용한다.
- 2) 상처에 직접적으로 닿게 하지 않는다.
- 3) 사용 후 발진, 발적, 가려움 등의 피부과민증상이 나타나는 경우 사용을 중지 한
- 4) 피부가 민감한 영/유아 사용 시 의사의 처방을 따른다.
- 5) 같은 부위에 장시간 사용하지 않는다.

2. 사용방법

압박이 필요한 부위에 적당한 압력으로 원하는 길이만큼 감아 고정 시킨다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

사용한 제품은 폐기하고 재사용을 금지한다.

■ 사용 시 주의사항

1. 제품의 변형은 제품의 기능에 변화를 가져올 수 있다.
2. 사용 중 변형된 제품은 사용하지 않는다.
3. 사용 시 강한 압박은 환자에게 손상을 줄 수 있다.
4. 본 제품은 환부의 보존, 보호, 처치의 목적으로 사용하지 않는다.
5. 본 제품은 정상피부에만 사용해야 한다.
6. 본 제품은 일회용의료기기이므로 재사용금지한다.

■ 제조원

(주)밴드골드

경기도 안양시 만안구 일직로94번길 42, 1층, 3층, 5층(석수동)

개정 년.월.일. : 2026.03.25.

의료기기 / 일회용