

압박용 밴드 사용설명서

- 제조업허가번호 : 제5151호
- 제조인증번호 : 제신23-1713호
- 제품명 : BNG 압박밴드, BNG 코바, BNG KOBA, BNG 압박패드, BNG 멸균 코바, BNG 멸균압박패드, 더스탑-밴드, BNG the Stop BAND
- 품목명 : 압박용 밴드
- 모델명 : BG-KW11 외 15건
- 포장단위 : 제조원 포장단위
- 저장방법 : 고온다습하고, 직사광선이 있는 장소를 피해 실온(1~30℃)에서 보관한다.
- 사용기간 : 제조일로부터 36개월
- 사용목적 : 혈액이 고는 것을 방지하거나 신체의 일부분을 탄력으로 압박 또는 잡아주는 기구. 보온 또는 흘러내림 방지와 찰과상 예방 및 충격완화 등의 목적으로 사용하는 스포츠 용품 또는 환부의 보존, 보호, 처치 등의 목적으로 사용하는 붕대 등은 제외한다.
- 부작용 보고 관련 문의처 : 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 본 제품을 사용하기 전에 포장상태 및 손상여부를 면밀하게 확인한다.
- 2) 사용목적 및 사용방법, 주의사항에 대하여 충분히 숙지 후 사용한다.
- 3) 피부가 민감한 영/유아 사용 시 의사의 처방을 따른다.
- 4) 같은 부위에 장시간 사용하지 않는다.

나. 조작방법

- 1) 원하는 신체부위에 알맞은 규격의 제품을 선택한다.
- 2) 자착성을 이용하여 압박하면서 고정한다.
- 3) 원하는 길이만큼 감아 고정시키고, 남은 부분은 잘라낸다.

다. 사용 후 보관 및 관리 방법

- 1) 본 제품은 일회용이므로 재사용하지 않고 폐기한다. (재사용 금지)

■ 사용 시 주의사항

1. 본 제품은 의료기기이므로 의사의 처방 및 지도 하에 사용하여야 한다. (단일 환자 사용)
2. 사용 목적 이외의 다른 목적으로 사용하지 않는다.
3. 본 제품을 의료기기 고정의 목적으로 사용하지 않는다.
4. 사용 부위에 과도한 압박이 가해지지 않도록 한다.
5. 적절하게 사용할 수 없는 의학적 요인이 있는 환자에게는 사용하지 않는다.
6. 사용 중 적용 부위에 가려움증, 부어오름 등 이상이 있으면, 즉시 사용을 중단하고 의사와 상담한다.

7. 착용 시 날카로운 물체 및 손톱 등에 걸리지 않도록 주의해야 한다.
8. 과도한 압박이 없도록 수면 중 및 장시간 착용하지 않는다.
9. 본 제품은 환부의 보존, 보호, 처치의 목적으로 사용해서는 안 되며, 정상 피부에만 사용한다.

■ 제조원

(주)밴드골드

경기도 안양시 만안구 일직로94번길 42, 1층, 3층, 5층(석수동)

개정 년.월.일. : 2026.03.25.

의료기기 / 일회용 / E.O 멸균