

# BNG 실리콘픽스 아쿠아 사용설명서

- 제조업허가번호 : 제8624호
  - 제조인증번호 : 제신25-532호
  - 제품명 : BNG 실리콘픽스 아쿠아
  - 품목명 : 외과용품
  - 모델명 : BNG-A-53 외 9건
  - 사용목적 : 수술 부위를 덮어 오염 등에서부터 보호하는 데에 사용하는 천연 재료 또는 인조 재료로 만든 기구로서 상처부위 또는 인체내부와 직접적인 접촉이 없는 일회용 제품이다.
  - 부작용 보고 관련 문의처 : 한국의료기기안전정보원, 080-080-4183
- 
- 사용방법

## 가. 사용 전 준비 사항

- 1) 본 제품을 사용하기 전에 손상여부 등을 면밀하게 확인한다.
- 2) 부착부위에 수분 또는 이물질 등이 없는지 확인한다.

## 나. 조작방법

- 1) 사용할 부위를 청결하게 한다.
- 2) 제품 뒷면의 이형필름을 제거한 후 제품을 피부에 붙여 고정한다.
- 3) 제품 전면부에 보호 필름이 있는 경우 피부에 부착 후 보호 필름을 제거한다.

## 다. 사용 후의 보관 및 관리 방법

본 제품은 일회용이므로 재사용하지 않고 폐기한다. (재사용 금지)

## 사용 시 주의사항

- 1) 사용 목적 이외의 다른 목적으로 사용하지 않는다.
- 2) 사용 중 변형이 생긴 제품은 그 기능을 제대로 발휘하지 못하므로 사용을 중단한다.
- 3) 부착부위에 이물질이 있는지 확인 한 후 부착한다.
- 4) 이형필름 제거 후, 제품이 구겨지지 않도록 주의한다.
- 5) 일회용 의료기기 이므로 재사용하지 않는다.
- 6) 사용 중 부착 부위에 가려움증, 부어오름 등의 이상이 있을 경우 즉시 사용을 중단하고 전문의에게 진찰 받도록 한다.
- 7) 이 제품을 의료기기 등의 고정목적으로 사용하지 않는다.

## ■ 제조원

주식회사 단

울산광역시 울주군 웅촌면 은현공단3길 5

개정 년.월.일. : 2025.10.01.  
의료기기/일회용