

K-B.W Control 사용설명서

- 제조업허가번호 : 제5151호
- 제조인증번호 : 제인22-4519호
- 제품명 : K-B.W Control
- 품목명 : 압박용밴드
- 모델명 : K-B.W Control 외 29건
- 사용목적 :

1. 압박용 밴드 : 혈액이 고이는 것을 방지하거나 신체의 일부분을 탄력으로 압박 또는 잡아주는 기구. 보온 또는 흘러내림 방지와 찰과상 예방 및 충격완화 등의 목적으로 사용하는 스포츠 용품은 제외한다.
2. 체온유지용드레이프 : 환자의 체온을 일정하게 유지하는 데에 사용하는 드레이프

■ 사용방법

1. 압박용 밴드(제신16-1491호)

1) 사용 전 준비사항

- (1) 체질에 따라 피부트러블이 발생할 수 있으므로 의사처방에 따라 사용한다.
- (2) 상처에 직접적으로 닿게 하지 않는다.
- (3) 사용 후 발진, 발적, 가려움 등의 피부과민증상이 나타나는 경우 사용을 중지 한다.
- (4) 피부가 민감한 영/유아 사용 시 의사의 처방을 따른다.
- (5) 같은 부위에 장시간 사용하지 않는다.

2) 사용방법

압박이 필요한 부위에 적당한 압력으로 원하는 길이만큼 감아 고정 시킨다.

3) 사용 후 보관 및 관리방법

사용한 제품은 폐기하고 재사용을 금지한다.

2. 체온유지용드레이프(제인22-4464호)

1) 사용 전 준비 사항

- (1) 포장지 파손 유무를 점검한다.
- (2) 내용물을 확인하고, 사용설명서를 숙지 후 사용한다.

2) 사용방법

- (1) 제품을 개봉하여 꺼낸다.
- (2) 필요한 시술을 시행하기 위해 침대나 탁자 등의 시술 장소에 적합한 크기의 제품을 펼쳐 오염방지 및 체온유지를 위해 환자를 덮는다.
- (3) 온열체가 활성화 되려면 약15분 이상 소요되므로 15분전 준비하여 사용한다.
- (4) 환자에 적용한 제품을 점검하고 확인한다.

3) 사용 후 보관 및 관리 방법

- (1) 1회 사용 후 재사용을 금지하고 폐기한다.

■ 사용 시 주의사항

1. 압박용 밴드(제신16-1491호)

- 1) 제품의 변형은 제품의 기능에 변화를 가져올 수 있다.
- 2) 사용 중 변형된 제품은 사용하지 않는다.
- 3) 사용 시 강한 압박은 환자에게 손상을 줄 수 있다.
- 4) 본 제품은 환부의 보존, 보호, 처치의 목적으로 사용하지 않는다.

5) 본 제품은 정상피부에만 사용해야 한다.

6) 본 제품은 일회용의료기기이므로 재사용금지한다.

2. 체온유지용드레이프(제인22-4464호)

1. 본 제품은 사용방법을 숙지한 전문 의료인이 사용하여야 하며, 사용목적 이외의 사용을 금지한다.

2. 제품사용 시 부작용 - 가려움, 피부표백, 알러지 반응이 있거나 접착부위에서 열 발생 시 전문의와 상의한다.

3. 저온화상을 방지하기 노출된 피부에 직접 닿지 않도록 한다.

4. 저온화상을 방지하기 위해 바닥에 펴서 사용을 하지 않는다.

5. 1회 사용 후 재사용을 금지하고 폐기한다.

■ 제조원

(주)밴드골드

경기도 안양시 만안구 일직로94번길 42, 1층, 3층, 5층(석수동)

■ 부작용 보고 관련 문의처

한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

개정 년.월.일. : 2026.03.25.

의료기기 / 일회용