

K-dressing K-B.W 사용설명서

■ 제조업허가번호 : 제5151호

■ 품목허가번호 : 제허21-445호

■ 제품명 : K-dressing K-B.W

■ 품목명 : 체온 유지용 드레이프

■ 모델명 : 2510 드레싱-워머 외 35건

■ 사용목적 :

1. 체온유지용드레이프 : 환자의 체온을 일정하게 유지하는데에 사용하는 드레이프

2. 반창고 : 붕대, 거즈, 카테터 등의 고정

■ 사용방법

1. 케이드레싱

환부의 크기에 따라 적당한 길이로 잘라 붙인다.

2. 체온유지용드레이프

1) 사용 전 준비 사항

(1) 포장지 파손 유무를 점검한다.

(2) 내용물을 확인하고, 사용설명서를 숙지 후 사용한다.

2) 사용방법

(1) 제품을 개봉하여 꺼낸다.

(2) 필요한 시술을 시행하기 위해 침대나 탁자 등의 시술 장소에 적합한 크기의 제품을 펼쳐 오염방지 및 체온유지를 위해 환자를 덮는다.

(3) 온열체가 활성화 되려면 약15분 이상 소요되므로 15분전 준비하여 사용한다.

(4) 환자에 적용한 제품을 점검하고 확인한다.

3) 사용 후 보관 및 관리 방법

(1) 1회 사용 후 재사용을 금지하고 폐기한다.

■ 사용 시 주의사항

1. 케이드레싱

가. 피부과민 증상이 나타나는 경우에는 즉시 사용을 중단할 것.

나. 입에 닿지 않도록 주의할 것.

다. 직사광선을 피하여 습기가 적고 서늘한 실온 보관할 것.

2. 체온유지용드레이프

가. 본 제품은 사용방법을 숙지한 전문 의료인이 사용하여야 하며, 사용목적 이외의 사용을 금지한다.

나. 제품사용 시 부작용 - 가려움, 피부표백, 알러지 반응이 있거나 접착부위에서 열 발생 시 전문의와 상의한다.

다. 저온화상을 방지하기 위해 노출된 피부에 직접 닿지 않도록 한다.

라. 저온화상을 방지하기 위해 바닥에 펴서 사용을 하지 않는다.

마. 1회 사용 후 재사용을 금지하고 폐기한다.

■ 제조원

(주)밴드골드

경기도 안양시 만안구 일직로94번길 42, 1층, 3층, 5층(석수동)

■ 부작용 보고 관련 문의처
한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

개정 년.월.일. : 2026.03.26.

의료기기 / 일회용