

외과용품 사용설명서

- 제조업허가번호 : 제5151호
- 제조신고번호 : 제인18-39호
- 제품명 : BNG FIX-TB
- 품목명 : 의료기구용클립
- 모델명 : 슈퍼픽스Ⅳ 외 5건
- 사용목적 : 인체조직을 제외한 의료기기 등을 일시적으로 고정하거나 잡아주기 위해 사용하는 기구

■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 제품의 사용방법 및 사용시 주의사항을 숙지한다.
- 2) 제품을 미리 개봉하지 말고 사용 직전 개봉하여 사용한다.

나. 사용방법

- 1) 정확한 착용부위를 정한 후 노폐물이 없도록 닦는다.
- 2) IV혈관 내 카테터 삽입각도에 맞추어 각도유지 고정품을 끼워 고정시킨다.
- 3) 제품 뒷면에 접착 부위의 이형지를 떼 후 카테터 고정 후 피부표면에 고정시킨다.
- 4) 벨크로 고정장치 가운데 있는 고정품 이형지를 떼 이후 상단 위에 수액튜브를 부착한 다음 반으로 접어 추가 고정시킨다.

다. 사용 후 보관방법

- 1) 본 제품은 일회용 제품으로 재사용을 하지 않고, 정해진 방법에 따라 폐기한다.

■ 사용 시 주의사항

1. 전문 의료인에 의해 사용되어야 한다.
2. 가려움, 알레르기 반응 등이 나타날 경우 전문의와 상의한다.
3. 사용목적이 아닌 다른 용도로의 사용을 금한다.
4. 제품 제거 시 피부에 자극이 가지 않도록 천천히 제거한다.

■ 제조원

(주)밴드골드

경기도 안양시 만안구 일직로94번길 42, 1층, 3층, 5층(석수동)

■ 부작용 보고 관련 문의처

한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

개정 년.월.일. : 2026.06.09.

의료기기/일회용/EO멸균