

제조업허가번호 제5151호
제조인증번호 제인23-5119호
제품명 BNG 켈로스카겔
품목명 점착성 투명 창상피복재
모델명 BG-CIG15
용량 15g

저장방법 직사광선을 피해 실온 보관(1~30℃)

사용기간 제조일로부터 36개월 / 개봉 후 12개월

사용목적 개방된 창상 피부가 아닌 화상, 일반적 수술, 외상 등으로 인해 생긴 오래되거나 새로운 흉터, 켈로이드 흉터의 관리 및 보호 목적으로 사용

의료기기

사용방법

가. 사용 전 준비 사항

- 1) 본 제품의 사용기간을 확인하고 제품이 손상되었거나 오염되었는지 확인 후 사용 한다.
- 2) 상처가 아물고 피부표면에 손상이 없는지 확인한다.
- 3) 흉터부위와 그 주변을 물이나 생리식염수로 깨끗이 씻은 후 건조시킨다.
- 4) 피부를 완전히 건조시킨 후 크림이나 로션을 바르지 않는다.
- 5) 사용설명서를 숙지한 후 사용한다.

나. 사용방법 및 조작순서

- 1) 아침, 저녁으로 1일 2회 흉터부위에 적용한다.
- 2) 흉터부위를 씻고 건조시킨 후 제품을 종알 크기로 소량 취하여 흉터부위에 부드럽게 마사지하듯이 펴 바른다.
- 3) 너무 많은 양을 취한 경우 과량을 티슈로 부드럽게 제거하여 옷에 얼룩이 생기지 않도록 한다.

다. 사용 후의 보관 및 관리 방법

- 1) 사용 후에는 뚜껑을 잘 닫고, 고온 및 다습한 곳을 피하고 실온 (1 ~ 30℃)에서 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 청결한 곳에 보관한다.
- 3) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 4) 개봉한 제품의 최대 사용가능한 기간은 12개월로 해당 기간을 초과하여 사용하지 않는다.

사용 시 주의사항

가. 사용 시 주의사항

- 1) 개방된 창상에는 사용하지 말고 흉터에만 사용한다.
- 2) 상처에 딱지나 수술 봉합사가 있는 동안에는 사용해서는 안 된다.
- 3) 점막이나 눈에 가까운 부위에 사용해서는 안 된다.
- 4) 흉터에 다른 피부치료제 또는 피부 관리용 제품을 바른 후 사용해서는 안 된다.
- 5) 사용기간이 지난 제품은 사용해서는 안 된다.

나. 일반적 주의사항

- 1) 사용 전에 제품 손상여부를 확인한다.
- 2) 개방된 창상에는 사용하지 말고 깨끗하고 건조한 흉터에만 사용한다.
- 3) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 4) 직사광선을 피하고 실온 (1 ~ 30℃)에 보관한다.

다. 주의사항

- 1) 드물게 피부 발적, 자극감 또는 다른 이상반응이 나타날 경우 의사 또는 약사와 상의한다.
- 2) 개방된 창상에 사용해서는 안 된다.
- 3) 환자가 부작용을 일으킬 수 있는 가능성이 있으면 사용해서는 안 된다.
- 4) 실리콘 성분에 민감하거나 알러지가 있는 환자는 전문 의료인에게 상담한다.
- 5) 사용 시 절대 눈에 들어가거나 삼키지 않도록 주의한다.

본 제품은 의료기기임.

제조원

(주)밴드골드

경기도 안양시 만안구 일직로94번길 42 1층, 5층(석수동) Tel. 02) 891-0500

www.bandgold.co.kr