

K BODY COAT.WARMER 사용설명서

- 제조업허가번호 : 제5151호
- 제조인증번호 : 제인24-23호
- 제품명 : K BODY COAT
- 품목명 : 점착성 투명 창상피복재
- 모델명 : K BODY COAT.WARMER 외 17건
- 사용목적 :

1. 점착성투명창상피복재

창상 피부의 오염을 방지하고 보호하는 목적으로 사용되며, 삼출액이 적은 창상에 적용하도록 고안된 점착성 투명한 필름상의 피복재

2. 체온유지용드레이프

환자의 체온을 일정하게 유지하는데에 사용하는 드레이프

■ 사용방법

1. 점착성 투명 창상피복재

가. 사용 전 준비 사항

- 1) 해당 제품의 포장용기에 파손된 곳 및 제품형질에 이상이 없는지 확인한다.
- 2) 유효기간을 확인하여 유효기간 이내의 제품만을 사용한다.
- 3) 포장의 파손, 변질 등의 여부를 확인 후 정상적인 제품만을 사용한다.
- 4) 제품 사용설명서를 숙지한 후 사용하도록 한다.
- 5) 제품 사용전후에는 손을 깨끗이 씻도록 한다.

나. 사용방법 및 조작순서

- 1) 생리식염수 또는 수돗물을 이용하여 창상부위를 세척 한다.
- 2) 상처 주의의 피부를 천천히 건조 시킨다.
- 3) 연고나 크림 등의 위에는 사용할 수 없다.
- 4) 상처 가장자리보다 적어도 1~2Cm 정도 덮을 수 있는 사이즈의 제품으로 선택한다.
- 5) 제품의 보호용 필름을 제거하고 적용할 창상부위에 제품을 적용한다.
- 6) 제품의 교체주기 및 최대 적용 가능한 시간을 준수하여 사용한다.
- 7) 제거 시에는 임상적으로 징후가 나타나거나 삼출물의 뚜렷한 징후가 가장자리에 도달하면 본 제품을 교환한다.
- 8) 제품의 가장자리를 부드럽게 떼어 창상부위로부터 겔시트를 제거하여 폐기하도록 한다.

다. 사용 후 보관 및 관리 방법

- 1) 일회용 멸균제품이므로 재사용을 금하며, 규정에 따라 폐기한다. (재사용금지)

2. 체온유지용드레이프

가. 사용 전 준비 사항

- 1) 포장지 파손 유무를 점검한다.
- 2) 내용물을 확인하고, 사용설명서를 숙지 후 사용한다.

나. 사용방법

- 1) 제품을 개봉하여 꺼낸다.
- 2) 필요한 시술을 시행하기 위해 침대나 탁자 등의 시술 장소에 적합한 크기의 제품을 펼쳐 오염방지 및 체온유지를 위해 환자를 덮는다.

3) 온열체가 활성화 되려면 약 15분 이상 소요되므로 15분전 준비하여 사용한다.

4) 환자에 적용한 제품을 점검하고 확인한다.

다. 사용 후 보관 및 관리 방법

1) 1회 사용 후 재사용을 금지하고 폐기한다.

■ 사용 시 주의사항

1. 점착성 투명 창상피복재

가. 경고

1) 본 제품은 일회용 멸균제품으로 재사용시 환자에게 잠재적인 위험 발생의 소지가 있다.

2) 재생산, 세척 및 소독, 멸균 과정을 다시 실시해서는 안 되며, 이는 추가적으로 물리적 상해 및 환자
에게 감염을 초래할 수 있다.

3) 알러지 반응이 나타날 경우에는 사용을 중지하고 전문가에게 상담을 받도록 한다.

나. 사용상의 주의

1) 포장에 손상이 있는 경우에는 사용해서는 안 된다.

2) 겔 시트를 먹거나, 귀나 코에 넣거나 하면 위험하므로 어린이와 노인의 손이 닿지 않는 곳에 보관해
야 한다.

3) 주방·세면대·화장실 등에 흘려보내면 배관 등이 막히는 원인이 되므로 주의해야 한다.

4) 치료 중인 상처 (염증을 일으키고 있는 상처나 벌려진 상처)나, 종기 / 부스럼(딱지)가 있는 부위에는
사용하지 않는다.

2. 체온유지용드레이프

가. 본 제품은 사용방법을 숙지한 전문 의료인이 사용하여야 하며, 사용목적 이외의 사용을 금지한다.

나. 제품사용 시 부작용 - 가려움, 피부표백, 알러지 반응이 있거나 접착부위에서 열 발생 시 전문의와
상의한다.

다. 저온화상을 방지하기 노출된 피부에 직접 닿지 않도록 한다.

라. 저온화상을 방지하기 위해 바닥에 펴서 사용을 하지 않는다.

마. 1회 사용 후 재사용을 금지하고 폐기한다.

■ 제조원

(주)밴드골드

경기도 안양시 만안구 일직로94번길 42, 1층, 3층, 5층(석수동)

■ 부작용 보고 관련 문의처

한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

개정 년.월.일. : 2026.03.25.

의료기기 / 일회용